



TWIN GALERIES DE PROTECTION

points uniques

Sécurité

01. 4 SECTIONS

La sécurité avant tout

Grâce aux 4 sections, il y a des ouvertures plus petites entre les lattes, ce qui réduit considérablement le risque de pincement.



02. 12 CM HAUTEUR LIBRE

Mesure anti-pincement

Les 4 sections garantissent que les galeries de protection peuvent être très hautes et en même temps très compactes. Ainsi, la distance par rapport au sol, comme décrit dans la norme EN 60601-2-52, est maintenue.



03. PROTECTION ANTI-PINCEMENT

Manipulation sans soucis

Les galeries ne présentent aucun risque de pincement pour les mains. En descendant la latte supérieure, elle s'arrête automatiquement à 25 mm de la latte intermédiaire.



04. PANNEAU MOBILE

Sûr et ergonomique

Le panneau des galeries de protection accompagne les sections en tirant vers le haut. L'écart entre les sections est réduit et ne présente plus de risque de pincement. L'ouverture a été remplie par le panneau.



Ergonomie

01. PÉDALE DE FREIN

Accessible dans toutes les positions


Il est possible de faire glisser uniquement le panneau des galeries de protection, sans que les galeries doivent glisser dans leur totalité. Ainsi le frein est facilement accessible lorsque le lit est dans la position la plus basse.



02. AIDE À LA MOBILISATION

Confortable pour tous

Dans cette position mi- haute les galeries constituent une aide à la mobilisation. La latte supérieure sert comme un support d'appui pour le résident.

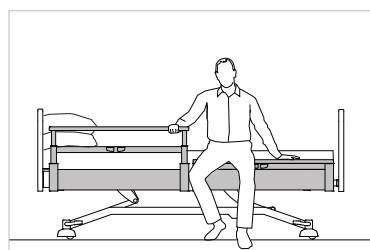

03. LATTE SUPÉRIEURE

Point d'appui


La latte supérieure de forme ergonomique en bois ou en aluminium offre un point d'appui et un bon soutien. La main peut se fermer complètement autour de la latte supérieure, ce qui fournit l'appui nécessaire lorsque vous vous levez ou lorsque vous marchez autour du lit.



04. SOINS ERGONOMIQUES

Sûr et ergonomique

Il est possible de faire glisser uniquement le panneau des galeries de protection, sans que les galeries doivent glisser dans leur totalité. Lorsque le lit est en position élevée, le personnel soignant peut placer les jambes et plier les genoux plus profondément sous le lit.

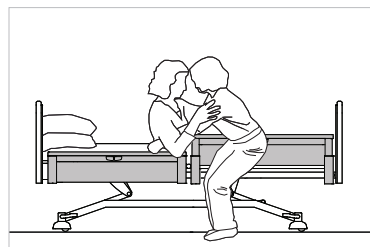

Manipulation et design

01. SECURITÉ INTÉGRÉE

Manipulation sans risque

Pour déclencher la manipulation des galeries, il faut d'abord lever légèrement la latte supérieure avec une main. Ce verrouillage empêche la descente involontaire des galeries.



02. CONTRÔLE VISUEL

En un coup d'oeil

Lorsque les broches vertes sont visibles, les galeries de protection sont verrouillées et dans leur position la plus haute.



03. COMPACT

Valeur esthétique

Les galeries de protection Twin sont très compactes dans leur position la plus basse (7,5 cm au-dessus du sommier) et forment un bel ensemble avec le lit. La sortie du lit est aisée et sans obstacles.



Positions

01. POSITION BASSE

Position esthétique

Hauteur de 7,5 cm (à partir du sommier). Dans cette position basse, les galeries ne sont pas visibles. La sortie du lit est aisée et sans obstacles (pas de compression au niveau des jambes).



02. POSITION DE SÉCURITÉ

Point d'appui

Cette position nous permet d'utiliser les galeries de protection comme point d'appui.



03. POSITION D'AIDE À LA MOBILITÉ (2 SECTIONS)

Aide pour se relever

Hauteur de 30 cm (à partir du sommier). Dans cette position mi-haute les galeries constituent une aide à la mobilité. La latte supérieure sert comme un support d'appui pour le résident.



04. POSITION HAUTE (3 SECTIONS)

Protection optimale

Hauteur de 41 cm (à partir du sommier). Cette position haute protège et sécurise le résident de façon optimale dans son lit. La hauteur élevée permet l'utilisation de matelas anti-escarres ayant une épaisseur jusqu'à 19 cm.

