



TWIN SEITENGITTER

Einzigartige Vorteile

Sicherheit

01. 4 TEILE

Sicherheit hat keinen Preis

Dank der 4 Teile gibt es kleinere Lücken zwischen den Seitengittern. Dadurch wird die Klemmgefahr erheblich verringert.

02. 12 CM BODENFREIHEIT

Keine Klemmgefahr

Die 4 Teile sorgen dafür, dass die Seitengitter sehr hoch nach oben geschoben werden können. Zugleich aber sind die Seitengitter sehr kompakt, und dadurch ist der Abstand zum Boden ausreichend (wie beschrieben in Sicherheitsnorm EN 60601-2-52).

03. KLEMMSICHERUNG

Bedienung ohne Sorgen

Beim Absenken der Twin Seitengitter halten diese auf einer Höhe von 2,5 cm. Auf diese Weise wird vermieden, dass die Finger beim Absenken geklemmt werden.

04. FÜLLUNG SCHIEBT MIT

Sicher und ergonomisch

Die untere Füllung der Seitengitter schiebt auch mit nach oben. Dies verringert die Klemmgefahr und verkleinert die Lücken zwischen den Teilen. Die Füllung füllt die Lücke aus.



Ergonomie

01. BREMSE

In allen Positionen erreichbar


Die Füllung der Twin Seitengitter kann nach oben schieben, ohne dass die Seitengitter ausschieben. Demzufolge kann die Bremse auch in der niedrigsten Position betätigt werden.



02. AUFSTEHILFE

Erforderliche Unterstützung

In der mittelhohen Position können die Seitengitter auch als Aufstehhilfe benutzt werden. Die oberste Latte bietet dem Bewohner die erforderliche Unterstützung.

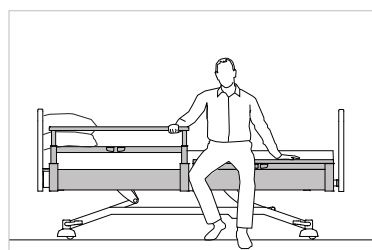

03. OBERSTE LATTE

Besserer Halt


Die ergonomisch gestaltete oberste Latte aus Holz oder Aluminium bietet einen besseren Halt und eine sehr gute Unterstützung. Die Hand kann völlig um die Latte gelegt werden, wodurch der erforderliche Halt beim Aussteigen oder beim Wandern rund ums Bett garantiert ist.



04. ERGONOMISCHE PFLEGE

Sicher und ergonomisch

Die Füllung der Twin Seitengitter kann nach oben schieben, ohne dass die Seitengitter mitschieben. In einer höheren Bettposition kann das Pflegepersonal die Beine und Knie tiefer unter das Bett stellen.

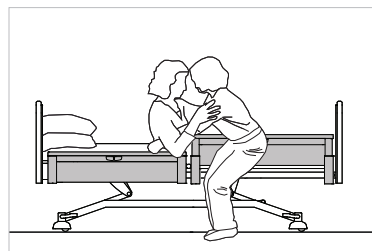

Bedienung und design

01. EINGEBAUTE SICHERHEIT

Bedienung ohne Risiko

Bevor die Seitengitter betätigt werden können, sollte die oberste Latte zuerst ein wenig gehoben werden. Diese Verriegelung beugt dem versehentlichen Absenken der Seitengitter vor.



02. SICHTPRÜFUNG

Mit einem Blick

Wenn die grünen Stifte sichtbar sind, sind die Seitengitter verriegelt und befinden diese sich in ihrer höchsten Position.



03. KOMPACT

Ästhetischer Wert

Die Twin Seitengitter sind sehr kompakt in ihrer niedrigsten Position (nur 7,5 cm über der Liegefläche) und bilden eine Einheit mit dem Bett. Man kann komfortabel und hindernisfrei aus dem Bett steigen.



Positionen

01. NIEDRIGSTE POSITION

Ästhetische Position

Höhe von 7,5 cm (von der Liegefläche gemessen). In dieser niedrigsten Position sind die Teile der Seitengitter nicht sichtbar, und kann man komfortabel und hindernisfrei aus dem Bett steigen (auf die Beine wird kein Druck ausgeübt).



02. HANDGRIFFPOSITION

Seitengitter als Handgriff

Diese Position ermöglicht es, die Seitengitter als Handgriff zu benutzen.



03. MOBILITÄTSFÖRDERNDE POSITION (2 TEILE)

Aufstehhilfe

Höhe von 30 cm (von der Liegefläche gemessen). Dank dieser mittelhohen Position können die Seitengitter als Aufstehhilfe benutzt werden. Die oberste Latte bietet dem Bewohner die erforderliche Unterstützung.



04. HÖCHSTE POSITION (3 TEILE)

Optimalen Schutz

Höhe von 41 cm (von der Liegefläche gemessen). Diese hohe Position bietet dem Bewohner optimalen Schutz in seinem Bett. Diese Höhe ermöglicht es, eine Anti-Dekubitusmatratze (Dicke: bis zu 19 cm) zu benutzen.

